

OXiPOWER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GERADOR PROFISSIONAL DE ÓLEO MEDICINAL



PARABÉNS!

Você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é desenvolvido com tecnologia própria da **Oxipower**, uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu **Gerador Profissional de óleo medicinal**. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do aparelho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu sanitizador acesse o site www.allkit.com.br/oxipower.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada pelo aparelho.



OXIPOWER

GERADOR DE ÓLEO MEDICINAL

O Gerador de óleo medicinal Oxipower foi projetado para uso profissional e pode ser utilizado de forma contínua e ininterrupta.

Único aparelho 4 em 1:

- Gerador de ozônio medicinal
- Gerador de óleo ozonizado
- Ozonizador de água
- Oxi-Sanitizador de ambientes

Você pode fazer a Oxi-Sanitização do seu consultório

Uso sem oxigênio medicinal:

O seu gerador de ozônio medicinal tem um micro-compressor incorporado e por isso, você pode, opcionalmente, utiliza-lo sem oxigênio medicinal. Valem lembrar que o ar ambiente tem menos de 20% de oxigênio e por isso a concentração será reduzida



ÍTEMS QUE ACOMPANHAM O GERADOR:

Acessórios que não acompanham o kit: cilindro com registro para oxigênio medicinal e recipiente de vidro p/ ozonizar óleo



01 Aparelho gerador de óleo ozonizado Medicinal



01 Mangueira de silicone com difusor de ozônio



01 Mangueira de silicone p/ Recipiente de vidro



01 Regulador de Fluxômetro

GERADOR DE ÓLEO MEDICINAL

Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal - OXIPOWER

Tabela de concentrações, volumes e tempos

Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal Mod.: GOP-500	Fluxo Oxigênio Litros/ Min	Concentrações c/ Oxigênio Medicinal			Tempo de ozonização					
		Ug / ML	Mg / L	G / m3	Volume de óleo em temperatura de 10 graus Celsius					
					2	4	6	8	10	Litros
0,5 Litro / Min		200,0	200,0	200,0	3	6	9	12	15	Horas
1,0 Litro / Min		100,0	100,0	100,0	6	12	18	24	30	Horas
2,0 Litro / Min		50,0	50,0	50,0	12	24	36	48	60	Horas

Tempo de ozonização					
Volume de óleo em temperatura ambiente (20 a 25 graus Celsius)					
2	4	6	8	10	Litros
6	12	18	24	30	Horas
12	24	36	48	60	Horas
24	48	72	96	120	Horas

Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal Mod.: GOP-1000	Fluxo Oxigênio Litros/ Min	Concentrações c/ Oxigênio Medicinal			Tempo de ozonização					
		Ug / ML	Mg / L	G / m3	Volume de óleo em temperatura de 10 graus Celsius					
					2	4	6	8	10	Litros
0,5 Litro / Min		400,0	400,0	400,0	1,5	3	4,5	6	7,5	Horas
1,0 Litro / Min		200,0	200,0	200,0	3	6	9	12	15	Horas
2,0 Litro / Min		100,0	100,0	100,0	6	12	18	24	30	Horas

Tempo de ozonização					
Volume de óleo em temperatura ambiente (20 a 25 graus Celsius)					
2	4	6	8	10	Litros
3	6	9	12	15	Horas
6	12	18	24	30	Horas
12	24	36	48	60	Horas



MODO DE USO



1. Retirar as tampinhas dos terminais lower-locker e registro 3 vias;
2. Conecte o cilindro de oxigênio medicinal;
3. Encaixar a seringa no registro 3 vias;
4. Abrir o registro 3 vias na posição da seringa;
5. Opcionalmente você pode utilizar a mangueira de silicone (acessório 1) como uma extensão. Você pode conectar a mangueira no registro 3 vias e a seringa na outra ponta da mangueira;



6. Regular o Fluxo de oxigênio (no regulador fluxômetro)
7. Ligar o gerador de ozônio: (Escolher a posição 1, 2 ou 3, conforme a concentração de ozônio desejada. - *Veja a tabela de concentração*)
8. Abrir o registro do cilindro para liberar o oxigênio;
9. Acompanhe a quantidade de ozônio desejada.
10. Fechar o registro do cilindro para suspender o oxigênio;



11. Desligar o gerador de ozônio;
12. Gire o registro 3 vias para a posição do destruidor de ozônio. O excesso de ozônio (resíduo) será canalizado para o destruidor de ozônio e butido no seu aparelho.
13. Retire a seringa com o ozônio. Está pronta para você aplicar.
14. Após o uso, coloque as tampinhas dos terminais lower-locker e registro 3 vias

TECNOLOGIA

O ozônio é produzido à partir do oxigênio do ar ambiente, através do “Efeito Corona” e a tecnologia Oxipower utiliza módulos com eletrôdo de titânio e célula de quartzo que garante alta qualidade e concentração de ozônio, com baixo consumo de energia elétrica e maior vida útil do sistema.

Existem diferentes protocolos que orientam a produção de óleos ozonizados, que variam em relação ao tipo de óleo, tempo de ozonização e concentração de ozônio.

O tipo de óleo, você escolhe, sendo o mais utilizado o óleo de girassol

O tempo de ozonização você decide, bem como ajusta a concentração de ozônio através da quantidade de oxigênio no regulador fluxômetro.

O óleo de girassol ozonizado é um produto natural e Pode ser utilizado inúmeras aplicações, sendo excelente para a saúde e estética da pele.

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DA PELE:

- Auxilia na manutenção, hidratação, nutrição e proteção da pele.
- Eficaz para inflamações, acne, pequenos ressecamentos e irritações. Com suas propriedades restauradoras, cicatrizantes e antioxidantes
- É rico em vitamina E e Ácidos Graxos (Ômega 6 e 9).
- Arranhões, machucados, inflamações, micoses, lesões, cortes, feridas e outros problemas aparecem em nossa pele.
- O óleo ozonizado é um incrível regenerador, contribuindo com o processo de cicatrização e protegendo a pele num estado mais sensível.
- Também tem efeito contra fungos e bactérias
- Oleozon Girassol pode ser utilizado no corpo inteiro.



APLICAÇÕES

ROSTO

- Corte, feridas e machucados
- Acnes
- Psoríase, escamação
- Pele seca e rachada
- Alergias, irritações, picadas de insetos
- Pós-barba: amacia e acalma a pele. Anti inflamatório local para pelos encravados e inflamados, normalmente na região do pescoço.

BOCA

- Pode ser usado nos lábios e dentro da boca.
- Excelente hidratante de Lábios rachados e ressecados
- Para tratar Herpes e Aftas.

CORPO

- Para cicatrizar Corte, feridas e machucados.
- Dermatites e Eczemas (Inflamações na pele)
- Combate Fungos, trata Lesões e Herpes Zoster.
- Ótimo para Queimaduras e Assaduras e Picadas de insetos

MÃOS E PÉS

- Ótimo para Mãos e pés secos e rachados
- Trata Fungos e micoses nas unhas
- Acelera a cicatrização de Cortes, feridas e machucados



GARANTIA

A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e, para usufruir a mesma, você deverá apresentá-la. O seu **Gerador Profissional de óleo ozonizado** tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 06 (seis) meses, sendo que a garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu **Gerador Profissional de óleo ozonizado**, dirija-se ao distribuidor onde você adquiriu seu aparelho, ou ainda, entre em contato com a Oxipower, através do e-mail mariano@allkit.com.br.



OXIPOWER

OBRIGADO!


Nós da **Oxipower** agradecemos pela sua escolha e confiança. Esperamos que seu trabalho seja mais eficiente e ágil com nosso produto a sua disposição. Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo possível. Seguem, abaixo nossos contatos.

 www.oxipower.com.br

 comercial4@allkit.com.br

 19 3829.1124 / 19 9.9617.3944

 Rua Antenor Bergamo I Parque dos Cocais
Valinhos SP | CEP 13273-182

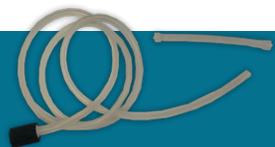

GERADOR DE ÓLEO MEDICINAL