



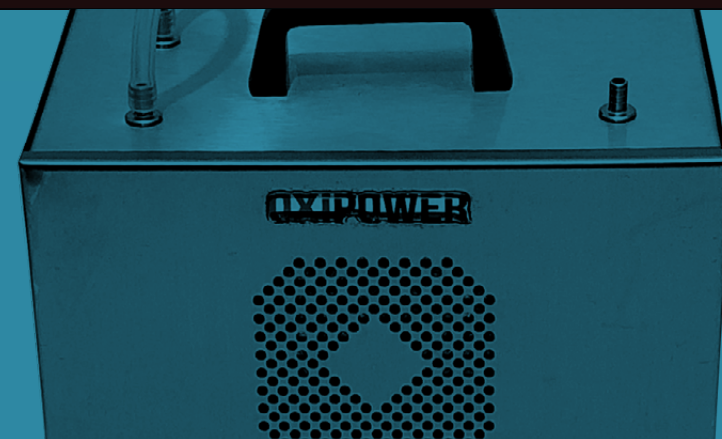

OXiPOWER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GERADOR PROFISSIONAL DE ÓLEO OZONIZADO

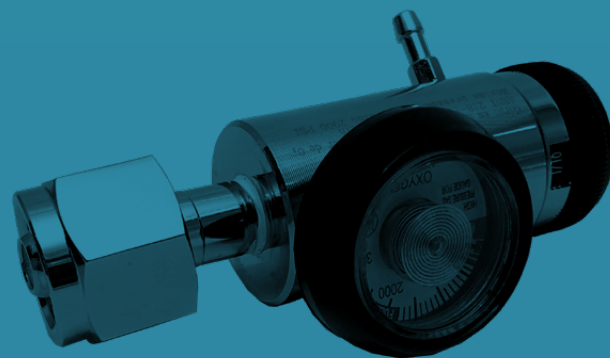

PARABÉNS!

Você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é desenvolvido com tecnologia própria da **Oxipower**, uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu **Gerador Profissional de óleo ozonizado**. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do aparelho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu sanitizador acesse o site **www.allkit.com.br/oxipower**.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada pelo aparelho.



OXIPOWER

GERADOR DE ÓLEO OZONIZADO

O Gerador de óleo ozonizado Oxipower foi projetado para uso profissional e pode ser utilizado de forma contínua e ininterrupta.

Único aparelho 3 em 1:

- ozonizar óleo;
- ozonizar água;
- oxi-sanitização do ambiente

Micro-compressor incorporado para gerar ozônio através do ar ambiente, sem a necessidade de oxigênio medicinal.




ÍTEMS QUE ACOMPANHAM O GERADOR:

Cilindro de oxigênio medicinal não acompanha o kit. Você vai precisar comprar ou alugar um cilindro de oxigênio para produzir o óleo ozonizado.



01 Aparelho gerador de óleo ozonizado Mod. GOP - 500

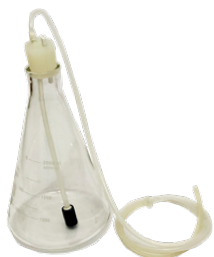

01 Recipiente de vidro 2 litros com tampa de silicone



01 Mangueira de silicone com difusor de ozônio



01 Mangueira de silicone p/ Recipiente de vidro



01 Destruidor de resíduos de ozônio



01 Regulador de Fluxômetro com 12 regulagens.

GERADOR DE ÓLEO OZONIZADO

Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal - OXIPOWER

Tabela de concentrações, volumes e tempos

Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal Mod.: GOP-500	Fluxo Oxigênio Litros/ Min	Concentrações c/ Oxigênio Medicinal			Tempo de ozonização					
		Ug / ML	Mg / L	G / m3	Volume de óleo em temperatura de 10 graus Celsius					
					2	4	6	8	10	Litros
	0,5 Litro / Min	200,0	200,0	200,0	3	6	9	12	15	Horas
	1,0 Litro / Min	100,0	100,0	100,0	6	12	18	24	30	Horas
	2,0 Litro / Min	50,0	50,0	50,0	12	24	36	48	60	Horas

Tempo de ozonização					
Volume de óleo em temperatura ambiente (20 a 25 graus Celsius)					
2	4	6	8	10	Litros
6	12	18	24	30	Horas
12	24	36	48	60	Horas
24	48	72	96	120	Horas


Gerador de Óleo Ozonizado com Oxigênio Medicinal Mod.: GOP-1000	Fluxo Oxigênio Litros/ Min	Concentrações c/ Oxigênio Medicinal			Tempo de ozonização					
		Ug / ML	Mg / L	G / m3	Volume de óleo em temperatura de 10 graus Celsius					
					2	4	6	8	10	Litros
	0,5 Litro / Min	400,0	400,0	400,0	1,5	3	4,5	6	7,5	Horas
	1,0 Litro / Min	200,0	200,0	200,0	3	6	9	12	15	Horas
	2,0 Litro / Min	100,0	100,0	100,0	6	12	18	24	30	Horas

Tempo de ozonização					
Volume de óleo em temperatura ambiente (20 a 25 graus Celsius)					
2	4	6	8	10	Litros
3	6	9	12	15	Horas
6	12	18	24	30	Horas
12	24	36	48	60	Horas



MODO DE USO

LIGAR/DESLIGAR

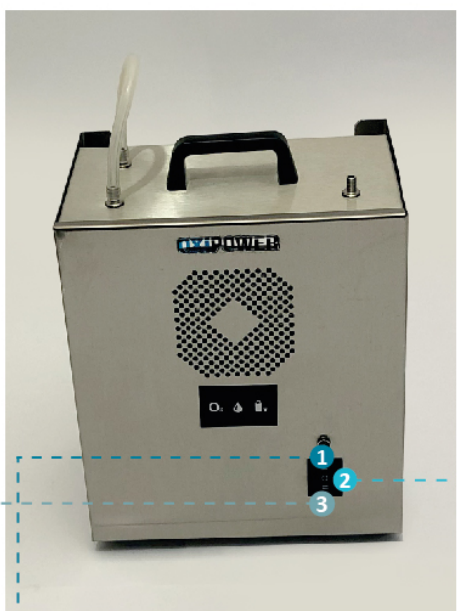


1 Opção 1: Ozônio com Oxigênio (O^2) Medicinal

Opção 2: Aparelho desligado. (estágio do meio) 2

3 Opção 3: Ozônio com Oxigênio (O^2) Ambiente

MÉTODO PARA PRODUIZIR OZÔNIO COM OXIGÊNIO MEDICINAL

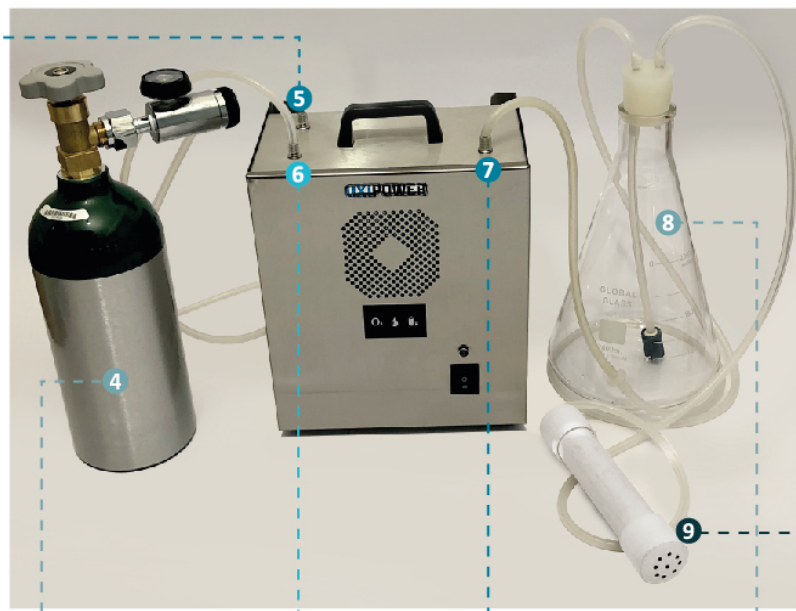

4 Cilindro de Oxigênio (O^2) Medicinal com Fluxômetro

5 Saída de Oxigênio (O^2) Ambiente


6 Entrada de Oxigênio (O^2) Medicinal ou Oxigênio (O^2) Ambiente

7 Saída de Ozônio (O^3)

8 Recipiente com Óleo Ozonizado

9 Destruidor de Ozônio (O^3)

P/ PRODUIZIR OZÔNIO C/ OXIGÊNIO AMBIENTE

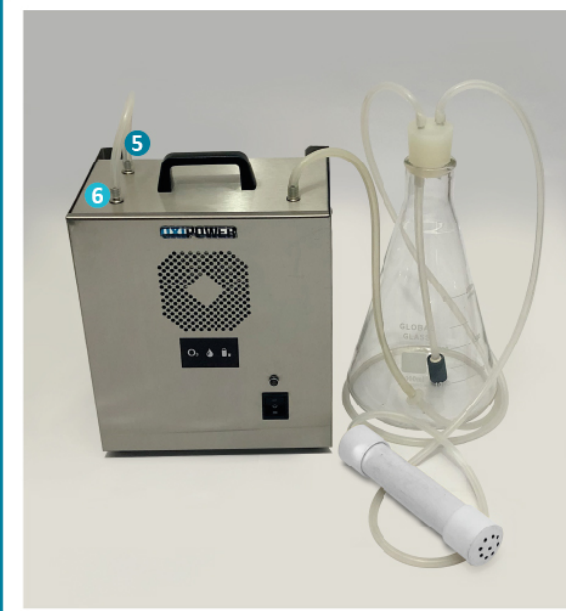

Para produzir Ozônio (O^3) com Oxigênio Ambiente conecte a mangueira da saída de Oxigênio Ambiente (O^2) na Entrada de Oxigênio (O^2).



TECNOLOGIA

O ozônio é produzido à partir do oxigênio do ar ambiente, através do “Efeito Corona” e a tecnologia Oxipower utiliza módulos com eletrôdo de titânio e célula de quartzo que garante alta qualidade e concentração de ozônio, com baixo consumo de energia elétrica e maior vida útil do sistema.

Existem diferentes protocolos que orientam a produção de óleos ozonizados, que variam em relação ao tipo de óleo, tempo de ozonização e concentração de ozônio.

O tipo de óleo, você escolhe, sendo o mais utilizado o óleo de girassol

O tempo de ozonização você decide, bem como ajusta a concentração de ozônio através da quantidade de oxigênio no regulador fluxômetro.

O óleo de girassol ozonizado é um produto natural e Pode ser utilizado inúmeras aplicações, sendo excelente para a saúde e estética da pele.

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DA PELE:

- Auxilia na manutenção, hidratação, nutrição e proteção da pele.
- Eficaz para inflamações, acne, pequenos ressecamentos e irritações. Com suas propriedades restauradoras, cicatrizantes e anti-oxidantes
- É rico em vitamina E e Ácidos Graxos (Ômega 6 e 9).
- Arranhões, machucados, inflamações, micoses, lesões, cortes, feridas e outros problemas aparecem em nossa pele.
- O óleo ozonizado é um incrível regenerador, contribuindo com o processo de cicatrização e protegendo a pele num estado mais sensível.
- Também tem efeito contra fungos e bactérias
- Oleozon Girassol pode ser utilizado no corpo inteiro.



APLICAÇÕES

ROSTO

- Corte, feridas e machucados
- Acnes
- Psoríase, escamação
- Pele seca e rachada
- Alergias, irritações, picadas de insetos
- Pós-barba: amacia e acalma a pele. Anti inflamatório local para pelos encravados e inflamados, normalmente na região do pescoço.

BOCA

- Pode ser usado nos lábios e dentro da boca.
- Excelente hidratante de Lábios rachados e ressecados
- Para tratar Herpes e Aftas.

CORPO

- Para cicatrizar Corte, feridas e machucados.
- Dermatites e Eczemas (Inflamações na pele)
- Combate Fungos, trata Lesões e Herpes Zoster.
- Ótimo para Queimaduras e Assaduras e Picadas de insetos

MÃOS E PÉS

- Ótimo para Mãos e pés secos e rachados
- Trata Fungos e micoses nas unhas
- Acelera a cicatrização de Cortes, feridas e machucados



GARANTIA

A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e, para usufruir a mesma, você deverá apresentá-la. O seu **Gerador Profissional de óleo ozonizado** tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 06 (seis) meses, sendo que a garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu **Gerador Profissional de óleo ozonizado**, dirija-se ao distribuidor onde você adquiriu seu aparelho, ou ainda, entre em contato com a Oxipower, através do e-mail mariano@allkit.com.br.



OXIPOWER

OBRIGADO!

Nós da **Oxipower** agradecemos pela sua escolha e confiança. Esperamos que seu trabalho seja mais eficiente e ágil com nosso produto a sua disposição. Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo possível. Seguem, abaixo nossos contatos.



www.oxipower.com.br



comercial4@allkit.com.br



19 3829.1124 / 19 9.9617.3944



Rua Antenor Bergamo I Parque dos Cocais
Valinhos SP I CEP 13273-182



GERADOR DE ÓLEO OZONIZADO